


MŨI LẤY XƯƠNG TỰ THÂN

AUTO-MAX

Hàn Quốc

Mở rộng để cho phép dễ dàng loại bỏ xương thu hoạch

Chốt hướng dẫn trung tâm để chống trượt bề mặt

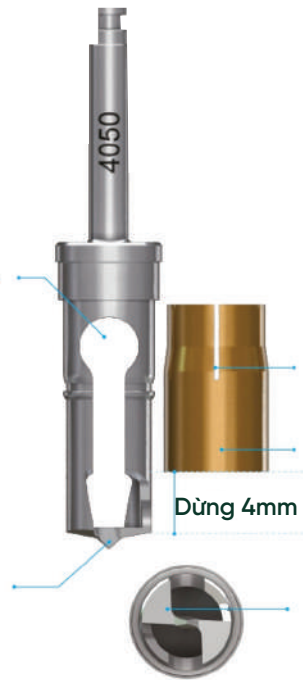

Được thiết kế để dễ dàng kết nối và ngắt kết nối


Được thiết kế tối ưu để ngăn ngừa mất xương thu hoạch

Thiết kế lưỡi cắt tối ưu để thu thập xương với tốc độ RPM thấp

CÁCH SỬ DỤNG


1. Kết nối Auto-Max với tay khoan và đặt nút chặn trên Auto-Max.
2. Auto-Max phải vuông góc với bề mặt xương. Nhấn tay khoan để cố định đầu nhọn của mũi khoan vào xương và bắt đầu khoan với tốc độ khoảng 500 vòng/phút với lượng nước nhiều.
3. Không tưới nước khi lấy xương. Việc tưới nước có thể làm phân tán xương thu được.
4. Auto-Max sẽ tự động dừng khi tiến vào xương độ sâu 4mm.
5. Ngắt kết nối chặn khỏi Auto-Max và thu thập các hạt xương tự thân vào khay vô trùng.
6. Xương nên được thu hoạch từ một vị trí mới mỗi lần, tránh chồng chéo với các vị trí thu hoạch khác

KÍCH THƯỚC AUTO - MAX

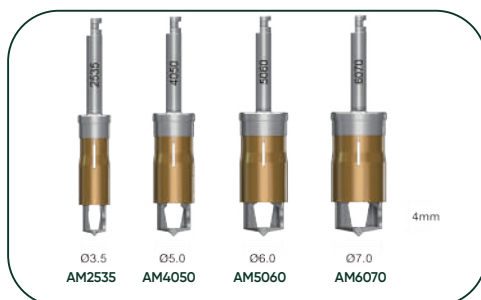

**MUA 3
TẶNG 1**

2.880.000đ/mũi

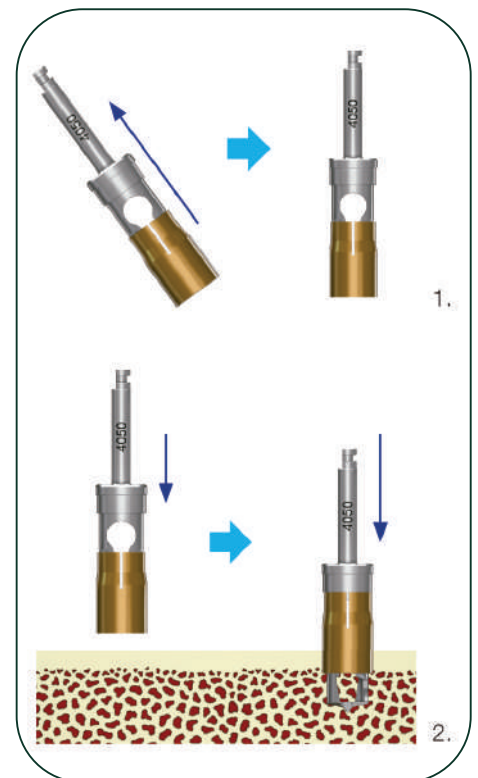

CÂY CẠO XƯƠNG EASY BONE SCRAPER

DENTALSTUDIO

Hàn Quốc



LƯU Ý

- Sản phẩm cần tiệt trùng trước khi sử dụng
- Khuyến nghị từ hãng nên sử dụng 1 lần (tối đa 4 lần nếu bác sĩ xoay lưỡi dao)

BỘ NONG TÁCH XƯƠNG BONE EXPANDER KIT

DENTALSTUDIO

Hàn Quốc

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Bộ dụng cụ mở rộng xương dùng cho bệnh nhân có phần chóp xương ổ răng hẹp
- Hạn chế tổn thương xương
- Tăng độ chính xác
- Lựa chọn lý tưởng cho mở rộng xương hàm hẹp & nâng xoang hàm



MŨI LINDERMEN

 **DENTALSTUDIO**
 **Hàn Quốc**

MÔ TẢ CHUNG

- Định vị.
- Định trục.
- Xoay hướng, đổi chiều khi khoan lệch.
- Khả năng cắt tốt.



Mã: LD-20

980.000đ/cái

MŨI ĐỤC LỢI TISSUE PUNCH

 **DENTALSTUDIO**
 **Hàn Quốc**

MÔ TẢ CHUNG

- Cắt mô nướu trong phẫu thuật cấy ghép Implant không cần dùng dao.
- Giảm thiểu chảy máu và nhanh lành vết thương.
- Lỗ trên thân dụng cụ, dễ dàng làm sạch mô còn sót.
- Lưu ý: Mỗi mũi nên sử dụng tối đa 5 lần để đảm bảo độ sắc bén.
- Kích thước: Ø3.0 - Ø3.5 - Ø4.0 - Ø4.5 - Ø5.0 - Ø5.5



6.170.000đ/bộ

940.000đ/lẻ

BỘ CỌ TITAN LÀM SẠCH CỔ IMPLANT TITANIUM BRUSH

 **DENTALSTUDIO**
 **Hàn Quốc**

MÔ TẢ CHUNG

Phân loại:

- Pocket 38mm, Short Pocket 33mm

Đặc tính:

- Bảo tồn ren Implant
- Làm sạch bề mặt diệt khuẩn.
- Tiết kiệm thời gian, điều trị tối đa 10 phút.
- Cọ NiTi rất hữu ích cho việc điều trị viêm quanh Implant

Công dụng: Mở ổ làm sạch Implant và kiểm khuyết xương của nhiễm khuẩn, tích sỏi, xi măng hoặc vật bên ngoài từ cơ thể khác.

Lưu ý: Sử dụng lần đầu: 500 - 800 RPM. Sử dụng thuần thực: 1200 RPM. Mỗi cọ chỉ nên sử dụng 1 lần duy nhất



Mã: 6352 (38mm), 6353 (33mm)


960.000đ/cái

BỘ KIT NÂNG XOANG KÍN + HỖ + THUỶ LỰC SINUS COMBINATION KIT


DENTAL STUDIO

📍 HÀN QUỐC

Lưu trữ thuận tiện, không lo thất lạc dụng cụ
Tiết kiệm chi phí so với bộ lẻ

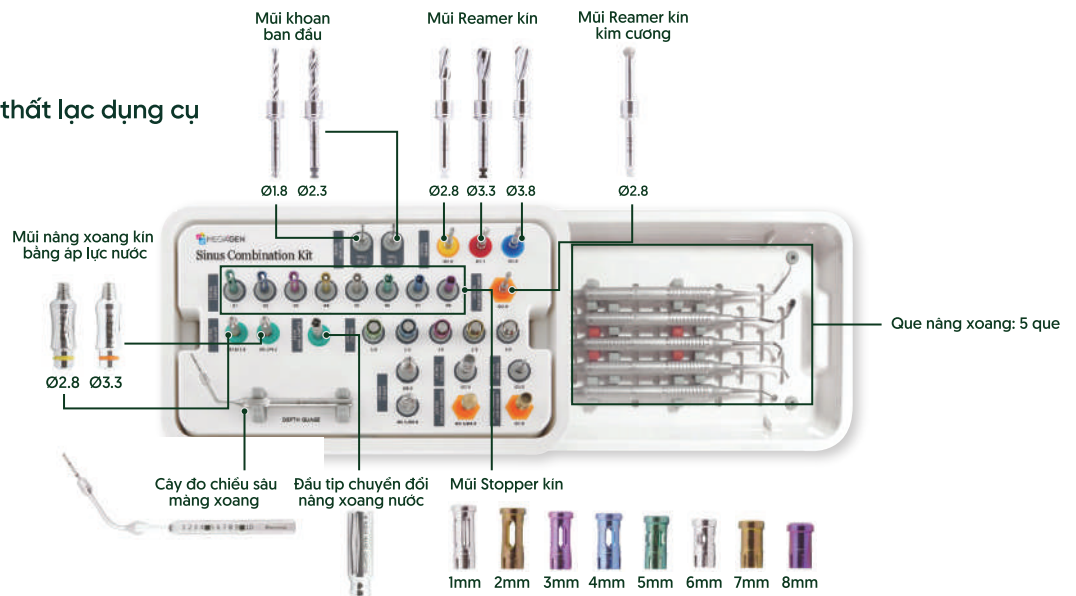

Mã: 7110

37.500.000đ

KIT NÂNG XOANG KÍN ĐƠN GIẢN


DENTAL STUDIO

SIMPLE SINUS CRESTAL REAMER KIT

📍 HÀN QUỐC

Hợp lý và kinh tế vì bộ mini bao gồm các thành phần thiết yếu. Sử dụng thuận tiện và dễ dàng hơn với các thành phần đơn giản.



Mũi khoan nâng xoang:
Ø2.8, Ø3.3, Ø3.8, Ø4.2
Mũi khoan nâng xoang kim cương:
Ø2.8
Bộ Stopper (1mm-5mm)

Mã: DTST - 7085

9.840.000đ

KIT NÂNG XOANG HỖ ĐƠN GIẢN


DENTAL STUDIO

SIMPLE SINUS LATERAL REAMER KIT

📍 HÀN QUỐC

Mũi Reamer: Ø6.5, Ø8.0
Mũi Reamer kim cương: Ø6.5, Ø7.0, Ø8.0
Mũi khoan lõi: Ø7.0
Bộ Stopper (1mm-3mm)



Mã: 7120

11.760.000đ

KIT NÂNG XOANG NƯỚC AQUA SINUS KIT



Hàn Quốc

Ngăn ngừa màng xoang thủng nhờ cơ chế đẩy màng xoang bằng áp lực nước
Thiết kế đầu vòi tip không gây rò rỉ nước
Đa dạng kích cỡ đầu tip tương thích với từng mũi khoan



THÀNH PHẦN:



Mã: AQUA-HA

7.100.000đ

MŨI KHOAN XƯƠNG TREPHINE



Hàn Quốc

Tính năng: Tháo implant fail, lấy xương

Lưu ý: Có nhiều kích thước khác nhau giúp giảm thiểu việc mất xương trong quá trình tháo bỏ implant fail. Ban đầu khoan theo ngược chiều kim đồng hồ để tránh áp lực, sau đó khoan theo chiều kim đồng hồ vào khu vực cần lấy xương.



Đặt trước

1.080.000đ/ mũi

KIT HƯỚNG DẪN ĐỊNH VỊ IMPLANT POSITIONING KIT




Hàn Quốc

Guide định vị



Mũi khoan định vị

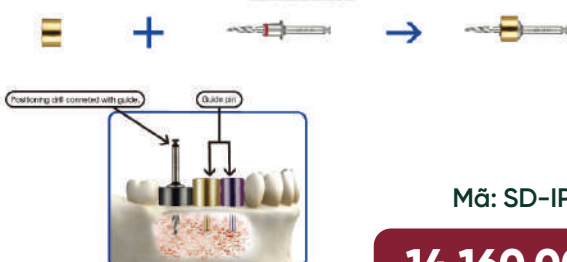

Mã: SD-IPO

14.160.000đ

KIT THÁO VÍT VÀ IMPLANT IMPLANT & SCREW REMOVER KIT



Hàn Quốc

Tương thích 95% các hãng implant hiện nay

Dụng cụ cấp cứu trong các trường hợp implant, ốc bị gãy hoặc vỡ

Tháo ốc gãy dễ dàng & an toàn bảo vệ ren implant nhờ vào Screw Guide và Screw Drill

Loại bỏ bất kì bộ phận nào bị gãy chỉ với bộ Kit này




Mã: 7051

23.500.000đ

BONE PROFILER KIT

 Hàn Quốc

 **MEGA GEN**
For Lifetime Smiles

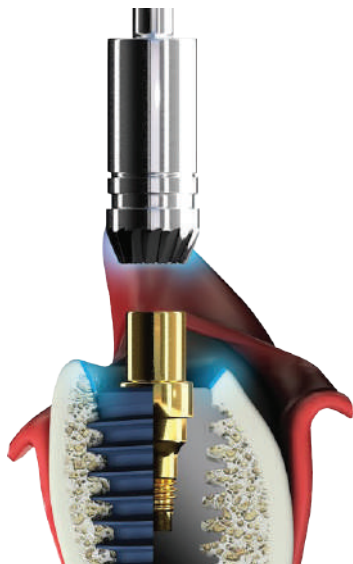

Mã bán lẻ: Ø4, Ø5, Ø6

AO	AOBP40G
	AOBP50G
	AOBP60G
AR	TANBPL40G
	TANBPL50G
	TANBPL60G
BD	AROBPL40G
	AROBPL50G
	AROBPS60G

Mã: KAOBP3000 (AO/ ST), KARBP3000 (AR)


11.635.000đ

2.950.000đ/mũi

- Loại bỏ vùng xương nhô ra xung quanh trụ
- Gồm 4 mũi định hướng với đường kính lần lượt là Ø4, Ø5, Ø6, Ø7

- Đặt Guide Pin vào trụ để xác định đúng hướng và đảm bảo không có mảnh vụn nào lọt vào thân trụ

- Chọn Bone Profiler phù hợp và mài xương xung quanh.

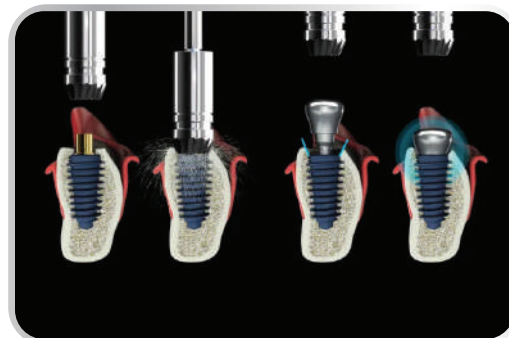

KIT ROOT MEMBRANE

📍 Hàn Quốc

Giải pháp mới cho vùng thẩm mỹ

- Bước đột phá từ kỹ thuật Socket Shield

- Hạn chế xâm lấn, không phá vỡ cấu trúc vùng xương hàm bệnh nhân.
- Mũi khoan kim cương chất lượng cao, sắc bén, đảm bảo độ chính xác và ổn định dù tốc độ quay cao.
- Giúp duy trì nguồn tưới máu đến vùng cấy ghép.
- Tăng tỷ lệ thành công trong quá trình tích hợp xương.
- Tăng tính thẩm mỹ tại vùng mô mềm.



Gate Glidden Burs




SD2018L SD2518L

Gate Glidden Drill




1DD1607 1DD1911

Initial Shaper

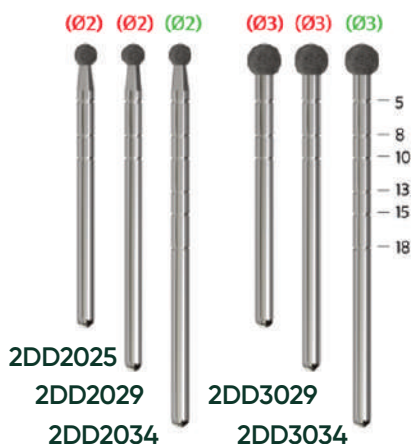

2DD2025
2DD2029
2DD2034
2DD3029
2DD3034

Round Diamond

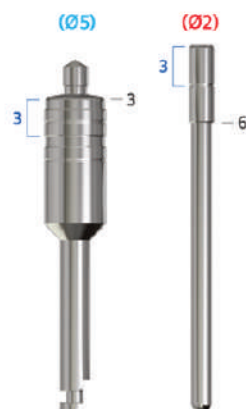

3DD50 3DD20H

Final Shaper



4DD4005

Tapered Diamond

Mã: RMK3000KB

19.660.000đ/ bộ

1.980.000đ/ mũi


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIT ROOT MEMBRANE



Hàn Quốc




1. Sau khi đo chiều dài ống tủy, cố định ống tủy bằng mũi Drill và Bur.

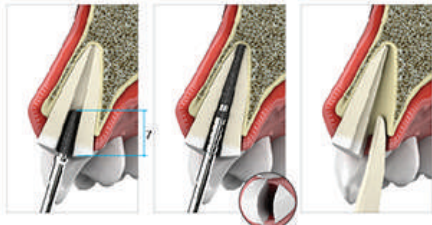

2. Sử dụng mũi Initial Shaper IS1 để tách phần chân răng khoảng 7mm sao cho phần bề mặt cắt cong tròn.


3. Sử dụng mũi Initial Shaper IS2 để tách phần chân răng còn lại và lấy phần chân răng bên trong ra ngoài.

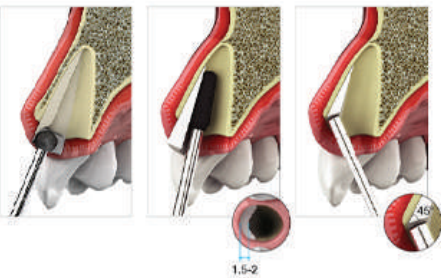

4. Làm nhỏ phần chân răng bên ngoài.

5. Sử dụng mũi khoan kim cương tròn để mài phần đầu chân răng ở phần nước.

6. Tạo khoảng trống đủ để chân răng và implant không tiếp xúc với nhau. Sử dụng mũi root membrane bur để mài nhẵn bề mặt trong chân răng.

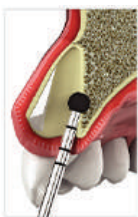

7. Sử dụng mũi creastal trimming bur để mài cho vùng rìa đầu chân răng nghiêng 45°.

8. Sử dụng mũi khoan kim cương tròn đường kính 3mm để tạo vết lõm trên xương để chuẩn bị cho cấy ghép implant tức thì.



9. Sử dụng mũi Initial Shaper IS2 để khoan mũi đầu tiên đặt implant. Nếu sử dụng mũi khoan thông thường sẽ dễ gây trượt theo đường chân răng.

10. Khoan từng mũi một như cấy implant thông thường



11. Việc đặt implant tức thì có thể gây dịch chuyển mô do không có lực cản ở phía môi. Sử dụng mũi khoan kim cương trơn nhọn cắt phần xương bên trong vòm miệng để ngăn chặn điều này. Đây là kiểu khoan chìm, điều chỉnh độ sâu mũi khoan theo kích thước của implant.

BỘ KIT NÂNG XOANG KÍN

MICA KIT

📍 Hàn Quốc

Chỉ định: Áp dụng khi chiều cao xương còn lại ≥ 4 mm.

- Bước 1: Dùng mũi khoan Ø2.5 với nút chặn 3 mm, tốc độ 800–1000 vòng/phút.
- Bước 2: Dùng mũi khoan Ø2.9, lắp nút chặn 4 mm, từ chiều cao xương còn lại 4–5mm.

Lưu ý:

- Trước khi khoan sâu thêm, kiểm tra sàn xoang đã mở chưa bằng thước đo độ sâu ở ngăn dưới (vạch đen dày = 4–5 mm).
- Nếu sàn xoang chưa mở, tiếp tục khoan tăng dần từng 1 mm, sử dụng các nút chặn 5 mm, 6 mm... cho đến mũi khoan cuối.
- Từ mũi khoan Ø3.3 đến Final Drill: Lắp cùng một nút chặn ở phía trên và tiến hành khoan tuần tự.




Mã: MKCA3000S

35.750.000đ

Mũi khoan CASA nâng cao

Cải thiện độ ổn định khi khoan + ghép xương tức thì

Lá chắn xương an toàn

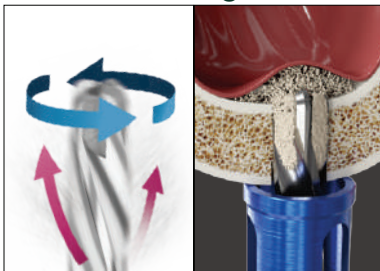

Khi khoan (400–800 RPM), mảnh xương được đẩy xuống sàn xoang mà không gây tổn thương màng xoang, kể cả khi vượt qua ~1 mm. Lưu ý cần mở sàn xoang hàm trên hoàn toàn.

Nâng xoang ghép xương



Với tốc độ thấp, Có thể ghép xương mà không cần thêm bất kì dụng cụ khác: Dùng mũi khoan nhỏ hơn 1 Ø và nút chặn đặt vật liệu ghép xương ở tốc độ 50–100 RPM, xoay theo chiều kim đồng hồ. Sau đó, dùng bộ dụng cụ nén chặt và lắp lại mũi khoan Final Drill.

Thử nghiệm lưỡi khoan Hybrid (Hybrid flute test)



CASA Drill

Bộ nút chặn nâng cao



Stopper với chiều cao đa dạng, gồm 11 vòng chặn với bước điều chỉnh an toàn 1mm, từ 2–12mm, đáp ứng nhiều trường hợp lâm sàng.

BỘ KIT NÂNG XOANG HỖ MILA KIT

 Hàn Quốc

 **MEGA GEN**
For Lifetime Smiles



Mã: MKLA3000M


22.575.000đ

Chỉ định: Áp dụng khi chiều cao xương còn lại ≤ 3 mm.

- Bước 1: Dùng mũi khoan kim cương (ngắn/dài) Ø6.5 tạo cửa sổ nhỏ mà không làm rách màng ngay cả khi chạm vào, khoan đến khi đầu mũi xuyên 1 mm qua cửa sổ xoang.
- Bước 2: Dùng Elevator 1 tách màng 180° theo một hướng, sau đó xoay ngược lại hướng khác tách nốt 180° còn lại.
- Bước 3: Dùng Elevator 2 đưa vào lỗ, để đầu mũi chạm xoang hàm trên, dùng mặt sau đầu mũi khoan nâng và mở rộng màng.
- Bước 4: Dùng Elevator 3 tách màng phía lưỡi.

Mũi khoan kim cương (Diamond Drill) nâng cao

An toàn & dễ dàng mở thành xoang bên

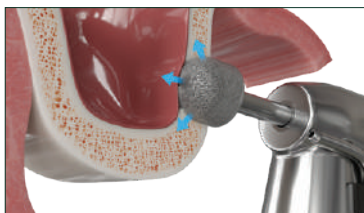

Mũi khoan kim cương đường kính Ø6.5mm giúp mở cửa sổ tối thiểu một cách dễ dàng và an toàn.



Thiết kế hỗ trợ cắt thành bên, giúp thao tác thuận tiện ngay cả ở những vị trí khó tiếp cận.

Thay bằng Dụng cụ đưa xương (Bone Carrier tiện lợi)

Cung cấp tức thì lượng lớn vật liệu ghép xương



Được thiết kế đặc biệt để ghép xương qua cửa sổ tối thiểu, cho phép đưa ngay một lượng lớn vật liệu ghép xương vào vị trí.

MEGGYVER KIT




📍 Hàn Quốc



Giải pháp Implant

Giải pháp Abutment

Giải pháp Screw

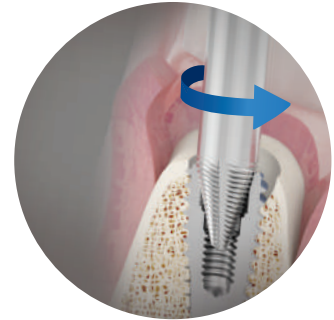

Mã: MKMG3000M


- Các mũi khoan được làm từ hợp chất cacbua vonfram, với kết nối mạnh và giá thành cao hơn so với thép không gỉ.
- Có nhiều loại đường kính khác nhau để xử lý các vấn đề chính xác và nhanh chóng hơn
- Cho thấy sự khác biệt rõ ràng nhờ vào 'Magic Grip' – thiết kế ren đặc biệt có thể kẹp và loại bỏ mục tiêu chỉ trong một lần.
- Tháo trụ implant, abutment và vít chỉ trong 1 bộ duy nhất.
- Chỉ cần xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đơn giản và dễ sử dụng

Lưu ý: Không được vượt quá mô-men xoắn tối đa cho từng đường kính.
(Tối đa 45N cho đường kính $\phi 1.8$ đến 2.0 / 35N cho $\phi 1.6$ / 25N cho $\phi 1.4$)



Implant failures

Implant Solution

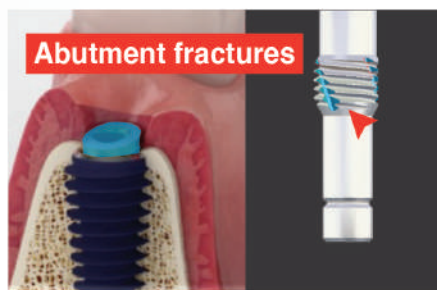



Abutment fractures

Abutment Solution



Screw fractures

Screw Solution

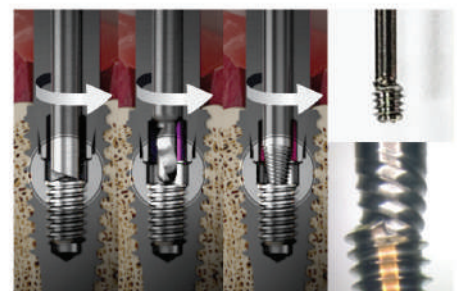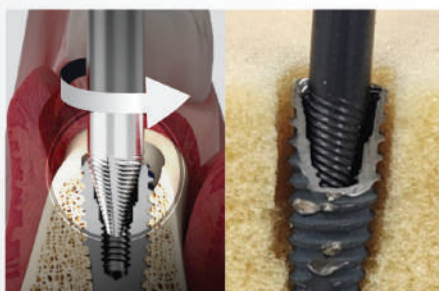


KIT PHẪU THUẬT IMPLANT ANYRIDGE

Hàn Quốc

- Đường kính lõi Ø3.3 – Ø4.3: Chiều dài implant thực tế ngắn hơn 0,8 mm so với chiều dài ghi trên nhãn
- Đường kính lõi Ø4.8: Chiều dài implant thực tế ngắn hơn 0,6 mm so với chiều dài ghi trên nhãn.


Mã: KARIN3001

23.500.000đ

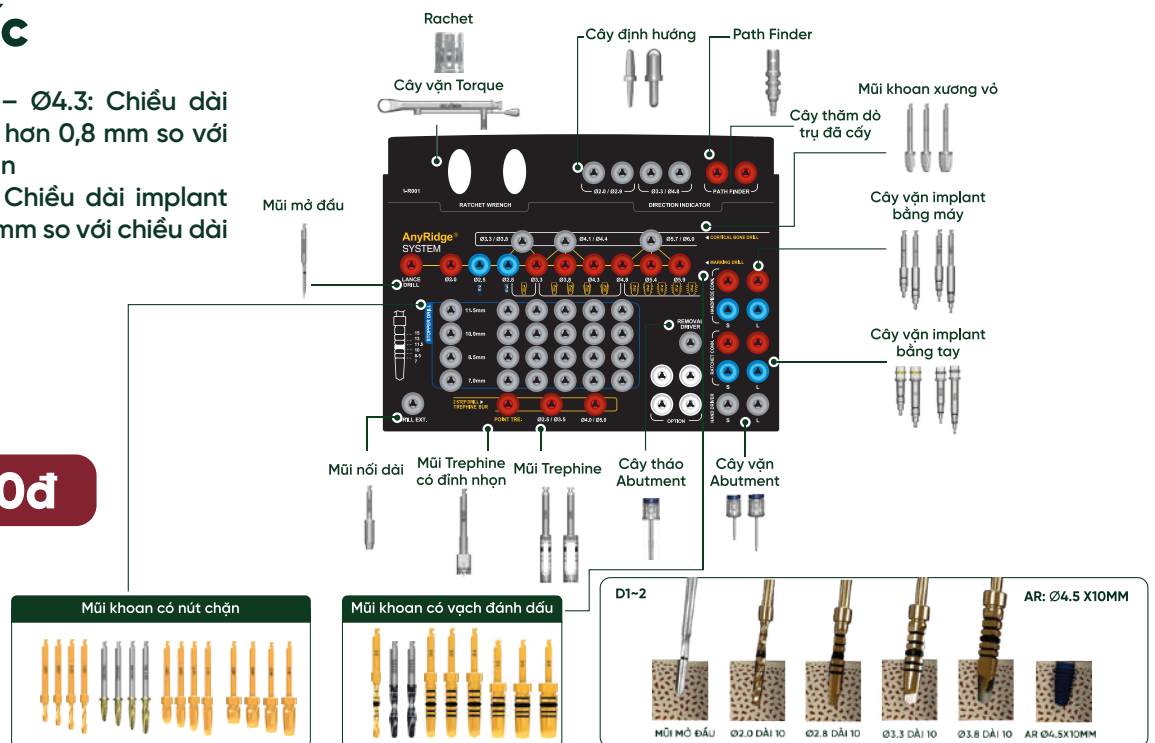

KIT PHẪU THUẬT IMPLANT ST

Hàn Quốc

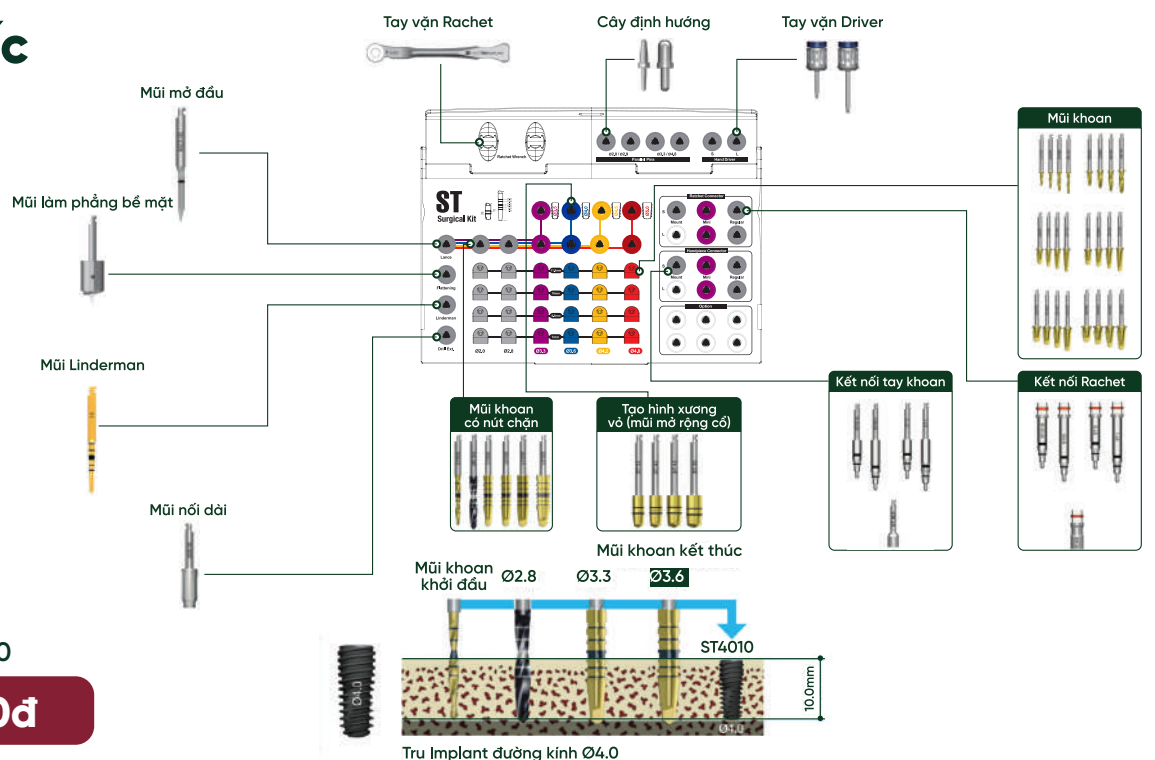

Mã: KSTIN3000


19.900.000đ

R2 UNIVERSAL KIT



Hàn Quốc


- Gồm bộ khoan cơ bản có thể sử dụng cho mọi hệ thống implant.
- Tùy chọn thêm các dụng cụ như Implant Carrier, mũi khoan xương vỏ (Cortical Bone Drill) và mũi tạo ren (Tap Drill) tương ứng với hệ thống implant.

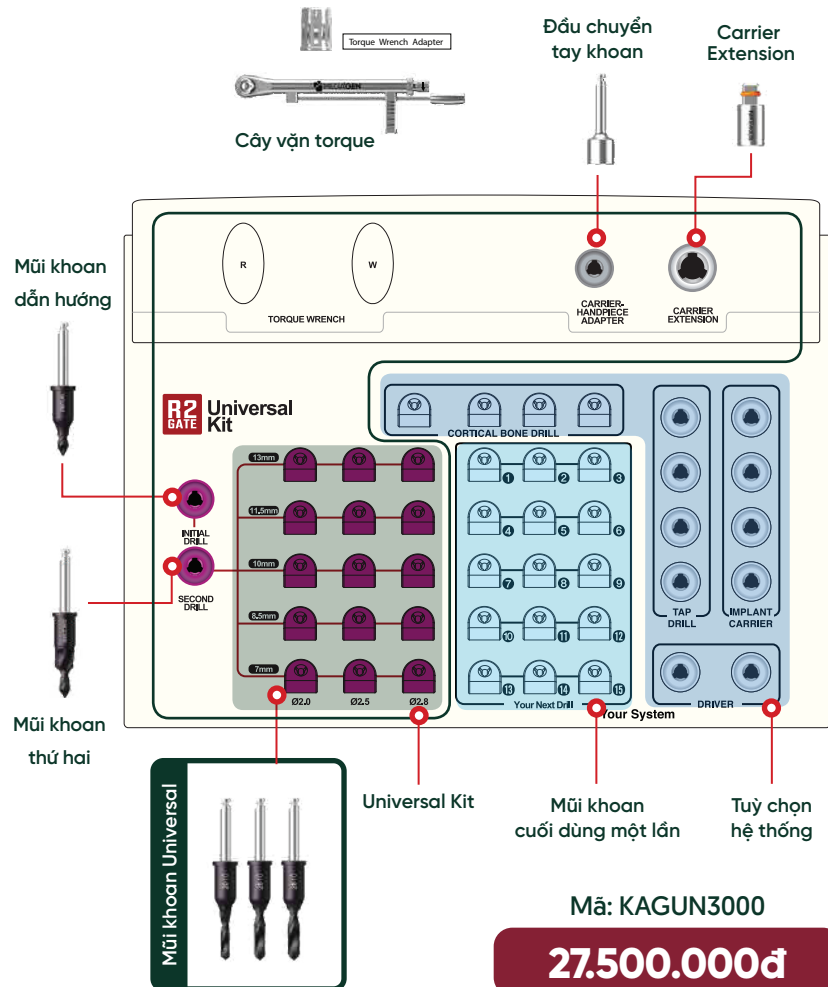

R2 ANCHOR KIT

Hàn Quốc

- Được sử dụng để giữ cố định máng hướng dẫn R2GATE trong miệng đối với các trường hợp mất răng toàn hàm hoặc mất răng tự do.
- Các loại đinh cố định có chiều dài khác nhau:
 - 5.0 mm, 7.5 mm, 10 mm...
- Đầu giữ máng hướng dẫn (Stent Anchor):
 - M1.8 (dành cho AnyRidge)
 - M2.0 (dành cho AnyOne)

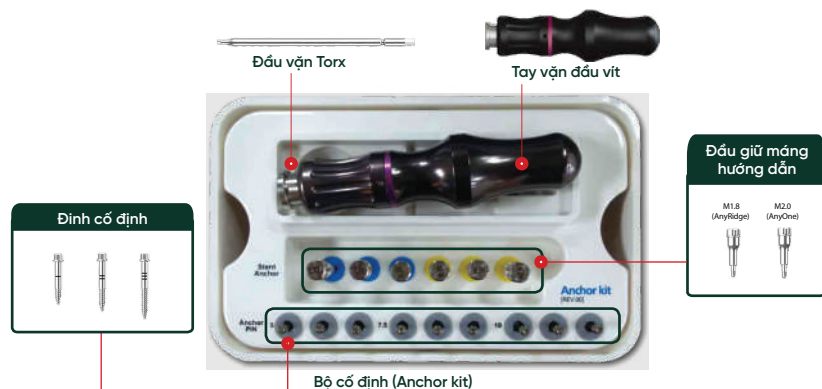


PROSTHETIC KIT

 **MEGA GEN**
For Lifetime Smiles

Hàn Quốc

Gắn phục hình dễ dàng, chính xác, tối ưu quy trình phục hồi nhanh chóng và hiệu quả

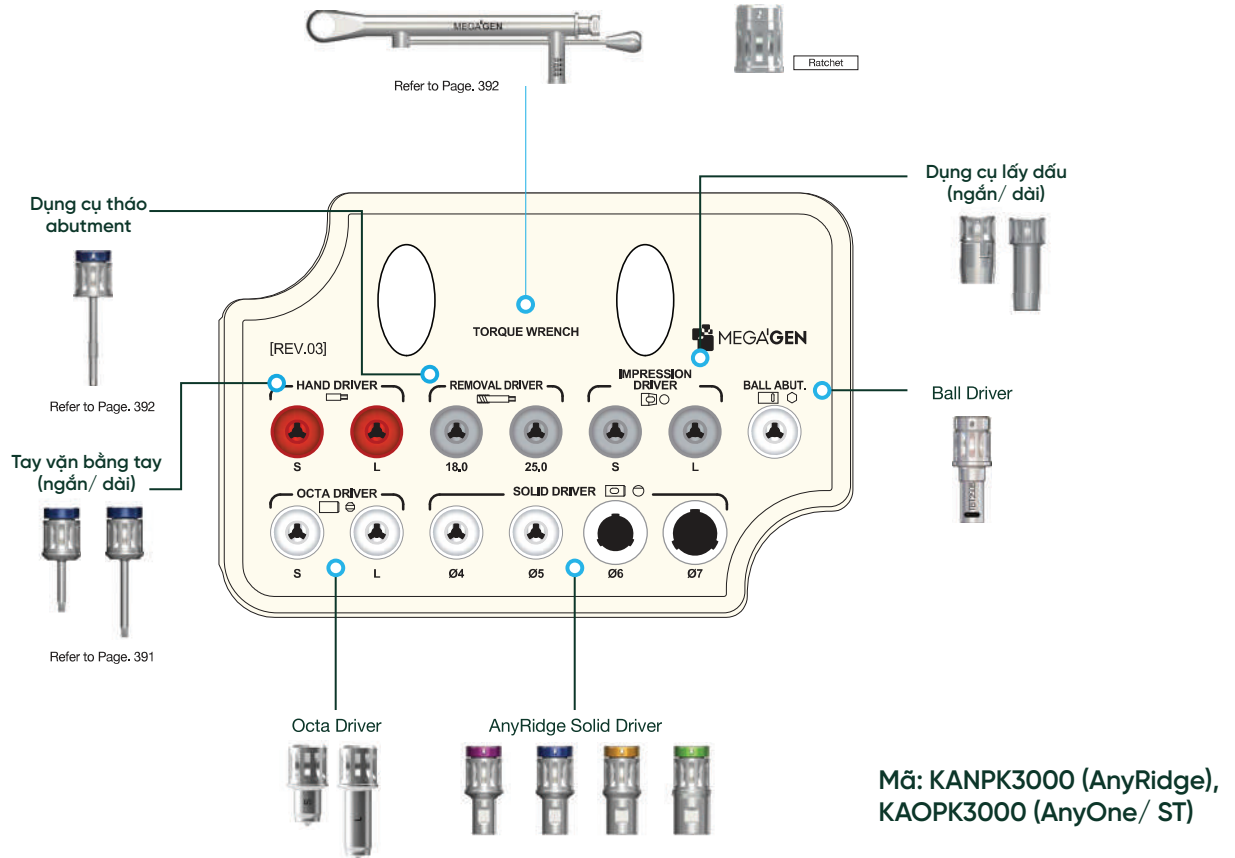

ANYONE STOPPER DRILL KIT

Hàn Quốc

Cho phép khoan an toàn và chính xác đến độ sâu mong muốn.

Mã: KAOS3000

13.047.000đ

